



iDNA Cardio Health

Το iDNA Cardio Health είναι ένα in vitro διαγνωστικό (IVD) προϊόν Γενετικής Ανάλυσης που εκτιμά τη γενετική προδιάθεση για καρδιαγγειακά νοσήματα χρησιμοποιώντας τη Βαθμολογία Πολυγονιδιακού Κινδύνου (PRS).

- Το μοναδικό in vitro διαγνωστικό (IVD) ιατροτεχνολογικό προϊόν με σήμανση CE.
- Το μόνο που συνδυάζει το φαινοτυπικό με το γενετικό προφίλ και προσδιορίζει το Προσαρμοσμένο PRS.

Παθήσεις για τις οποίες παρέχει Βαθμολογία PRS & Προσαρμοσμένου PRS

- | | |
|---|--|
|  Στεφανιαία νόσος |  Καρδιακή ανεπάρκεια |
|  Μυοκαρδιοπάθεια - Διατακτική |  Αρρυθμία - Κολπική μαρμαρυγή |
|  Μυοκαρδιοπάθεια - Υπερτροφική |  Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο |



Εύκολη & γρήγορη διαδικασία



Αγορά kit

Πωλείται στο φαρμακείο στη λιανική τιμή των €27



Λήψη δείγματος

Ο φαρμακοποιός πραγματοποιεί τη λήψη δείγματος παρειακού επιχρίσματος



Αποστολή δείγματος

Ο πελάτης αποστέλει **δωρεάν** το kit με το δείγμα παρειακού επιχρίσματος στην iDNA Laboratories



Εγγραφή & Πληρωμή

Ο πελάτης εγγράφει το kit στο myEMR (myemr.idna.gr) και πληρώνει τη γενετική ανάλυση (**€223 με έως 6 άτοκες δόσεις**)



Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης διατίθενται στον ηλεκτρονικό φάκελο του πελάτη στο myEMR

Ο ρόλος του Φαρμακοποιού

Πώληση kit

Πωλείται στο φαρμακείο στη λιανική τιμή των €27

Δειγματοληψία

Ο φαρμακοποιός πραγματοποιεί τη λήψη δείγματος παρειακού επιχρίσματος ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που περιγράφονται στην πίσω όψη του φυλλαδίου

Τιμή Kit στο Φαρμακείο

€23,89

Τιμή Χωρίς
ΦΠΑ 13%

€27,00

Τιμή με
ΦΠΑ 13%

€9,73

Markup



Οδηγίες Δειγματοληψίας

Πριν τη λήψη δείγματος και για τουλάχιστον 30 λεπτά ο πελάτης δεν πρέπει:

- να έχει φάει φαγητό
- να έχει μασήσει τσίχλα
- να έχει πιει οποιοδήποτε υγρό
- να έχει βουρτίσει τα δόντια
- να έχει κάνει στοματικές πλύσεις
- να έχει καπνίσει ή ατμίσει
- να φοράει κραγιόν



Δειγματοληψία παρειακού επιχρίσματος από τον φαρμακοποιό



Χρησιμοποιήστε την αποστειρωμένη μπατονέτα και ξεκινήστε να τρίβετε τη μπατονέτα στο εσωτερικό μέρος κάθε μάγουλου και στα ούλα. Πραγματοποιήστε έντονες περιστρεφόμενες κινήσεις ανοδικές και καθοδικές για ένα λεπτό συνολικά. Θα χρειαστούν περίπου 20 κινήσεις σε κάθε μάγουλο.



Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία λήψης, κρατήστε τη μπατονέτα στον αέρα για 1 λεπτό χωρίς να έρθει σε επαφή με καμία επιφάνεια και μετά τοποθετήστε την προσεκτικά στο δοκιμαστικό σωλήνα. Στη συνέχεια, βάλτε το δοκιμαστικό σωλήνα μέσα στο προστατευτικό σακουλάκι και τοποθετήστε το μέσα στο κουτί δειγματοληψίας.



Μετά την ολοκλήρωση της λήψης, βάζετε τη μπατονέτα στο κουτί δειγματοληψίας και το δίνετε στον πελάτη για τη δωρεάν αποστολή του στην iDNA Laboratories.



Δείτε βίντεο με τη Διαδικασία
Λήψης Δείγματος



Υπευθ. Ιατρικής Ενημέρωσης:



BIANEX A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. Έδρα: Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρ.: 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111, Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Κατασκευαστής:

iDNA
LABORATORIES

Τάκη Καβαλιεράτου 7, 145 64 Κηφισιά,
Τηλ.: 211 1021881
www.idnalaboratories.com
info@idnalaboratories.com
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 157439801000