

## iDNA NutriGenetix






Το iDNA NutriGenetix είναι ένα μοναδικό in vitro διαγνωστικό (IVD) προϊόν διατροφογενετικής ανάλυσης με σήμανση CE, και αποτελεί εργαλείο εξατομικευμένης διατροφής για τη διαχείριση του βάρους. Το μόνο που συνδυάζει το φαινοτυπικό με το γενετικό προφίλ και καταρτίζει ένα διατροφικό πλάνο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ασθενή.

### Περιλαμβάνει 26 κατηγορίες ανάλυσης:

- |  |  |
|--|--|
|  <p><b>ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Υδατάνθρακες</li> <li>Πρωτεΐνες</li> <li>Ολικά λιπαρά</li> <li>Κορεσμένα &amp; τρανς λιπαρά</li> <li>Ω6/Ω3 λιπαρά οξέα</li> </ul> |  <p><b>ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ &amp; ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάγκες σε ενυδάτωση</li> <li>Ανάγκες σε αντιοξειδωτικά</li> </ul> |
|  <p><b>ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 βιταμίνες</li> <li>3 ιχνοστοιχεία</li> </ul>   |  <p><b>ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αλάτι</li> <li>Καφεΐνη</li> <li>Λακτόζη</li> <li>Γλουτένη</li> </ul>        |
|  <p><b>ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κατανάλωση σνακ &amp; γλυκών</li> <li>Χρονότυπος</li> </ul>  |  |



## Εύκολη & γρήγορη διαδικασία

- |  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  <p><b>Αγορά kit</b></p> <p>Πωλείται στο φαρμακείο στη λιανική τιμή των €27</p> |  <p><b>Λήψη δείγματος</b></p> <p>Ο φαρμακοποιός πραγματοποιεί τη λήψη δείγματος παρειικού επιχρίσματος</p> |  <p><b>Αποστολή δείγματος</b></p> <p>Ο πελάτης αποστέλλει δωρεάν το kit με το δείγμα παρειικού επιχρίσματος στην iDNA Laboratories</p> |  <p><b>Εγγραφή &amp; Πληρωμή</b></p> <p>Ο πελάτης εγγράφει το kit στο myEMR (<a href="http://myemr.idna.gr">myemr.idna.gr</a>) και πληρώνει τη γενετική ανάλυση (<b>€223 με έως 6 άτοκες δόσεις</b>)</p> |  <p><b>Αποτελέσματα</b></p> <p>Τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης διατίθενται στον ηλεκτρονικό φάκελο του πελάτη στο myEMR</p> |
|--|---|---|---|---|

## Ο ρόλος του Φαρμακοποιού

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>Πώληση kit</b></p> <p>Πωλείται στο φαρμακείο στη λιανική τιμή των €27</p> | <p><b>Δειγματοληψία</b></p> <p>Ο φαρμακοποιός πραγματοποιεί τη λήψη δείγματος παρειικού επιχρίσματος ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που περιγράφονται στην πίσω όψη του φυλλαδίου</p> |
|---|--|

## Τιμή Kit στο Φαρμακείο

**€23,89**

Τιμή Χωρίς  
ΦΠΑ 13%

**€27,00**

Τιμή με  
ΦΠΑ 13%

**€9,73**

Markup



## Οδηγίες Δειγματοληψίας

Πριν τη λήψη δείγματος και για τουλάχιστον 30 λεπτά ο πελάτης δεν πρέπει:

- να έχει φάει φαγητό
- να έχει μασήσει τσίχλα
- να έχει πιει οποιοδήποτε υγρό
- να έχει βουρτίσει τα δόντια
- να έχει κάνει στοματικές πλύσεις
- να έχει καπνίσει ή ατμίσει
- να φοράει κραγιόν



## Δειγματοληψία παρειακού επιχρίσματος από τον φαρμακοποιό



Χρησιμοποιήστε την αποστειρωμένη μπατονέτα και ξεκινήστε να τρίβετε τη μπατονέτα στο εσωτερικό μέρος κάθε μάγουλου και στα ούλα. Πραγματοποιήστε έντονες περιστρεφόμενες κινήσεις ανοδικές και καθοδικές για ένα λεπτό συνολικά. Θα χρειαστούν περίπου 20 κινήσεις σε κάθε μάγουλο.



Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία λήψης, κρατήστε τη μπατονέτα στον αέρα για 1 λεπτό χωρίς να έρθει σε επαφή με καμία επιφάνεια και μετά τοποθετήστε την προσεκτικά στο δοκιμαστικό σωλήνα. Στη συνέχεια, βάλτε το δοκιμαστικό σωλήνα μέσα στο προστατευτικό σακουλάκι και τοποθετήστε το μέσα στο κουτί δειγματοληψίας.



Μετά την ολοκλήρωση της λήψης, βάζετε τη μπατονέτα στο κουτί δειγματοληψίας και το δίνετε στον πελάτη για τη δωρεάν αποστολή του στην iDNA Laboratories.



Δείτε βίντεο με τη Διαδικασία  
Λήψης Δείγματος

Υπευθ. Ιατρικής Ενημέρωσης:



**BIANEX A.E.** Έδρα: Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά  
Ταχ. Θυρ.: 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111, Fax: 210 8071573  
E-mail: [mailbox@vianex.gr](mailto:mailbox@vianex.gr) • WEBSITE: [www.vianex.gr](http://www.vianex.gr)  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύσμος Θεσσαλονίκης  
Τηλ.: 2310 861683, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Κατασκευαστής:



Τάκη Καβαλιεράτου 7, 145 64 Κηφισιά,  
Τηλ.: 211 1021881  
[www.idnalaboratories.com](http://www.idnalaboratories.com)  
[info@idnalaboratories.com](mailto:info@idnalaboratories.com)  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 157439801000

